

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ LİSTESİ**NUMUNE KABUL KRİTERLERİ****NUMUNE RET KRİTERLERİ**

AKŞ (Açlık Kan Şekeri)	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	Oda ısısında 8 saat, 2-8 °C de 3 gün	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
ÜRE/BUN	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C de 7 gün	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
KREATİNİN	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	Oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 5 gün	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
KOLESTEROL(TOTAL)	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	Oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 1 hafta	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
HbA1C(Glukohemoglobin)	EDTA'lı tam kan	Mor Kapaklı tüp	2 mL	18-20 C de	LİS	Pıhtılı, Hemolizli, Az veya Fazla Miktarla Alınmış Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
TAM KAN SAYIMI (Hemogram)	EDTA'lı tam kan	Mor Kapaklı tüp	3-5 mL	18-20 C de	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp

Hazırlayan

Kalite Yöneticisi

Jülide UYSAL

Onaylayan

Şirket Müdürü

Turgut MEMİŞ

ELEKTRONİK NÜSHADIR. KONTROLLÜ KOPYA KAŞESİ TAŞIMAYAN BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ LİSTESİ**NUMUNE KABUL KRİTERLERİ****NUMUNE RED KRİTERLERİ**

HDL KOLESTEROL	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	Oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 1 hafta	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
SGOT(AST)	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5mL	Oda sıcaklığında 24 Saat, buzdolabında 1 hafta	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
SGPT(ALT)	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	Oda sıcaklığında 24 Saat, buzdolabında 1 hafta	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
GGT(GAMMA-GT)	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	Oda sıcaklığında 24 Saat, buzdolabında 1 hafta	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
FT4(Free T4)	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	18-20 C de	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
TSH	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	18-20 C de	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp
TRİGLİSERİD	Serum	Sarı Kapaklı tüp	3-5 mL	Oda ısısında 2 gün, 2-8 °C'de 10 gün	LİS	Hemolizli, Hiperlipemik, İkterik, Bulanık, Kontamine, Barkodsuz veya Yanlış Barkodlu, Zaman Aşımli Örnekler, Kırılmış Çatlamış tüp, uygunsuz tüp

	Görevi	Adı Soyadı	İmza
HAZIRLAYAN	KALİTE YÖNETİCİSİ	JÜLİDE UYSAL	
ONAYLAYAN	LABORATUVAR YÖNETİCİSİ	SEVİM İPEKBAYRAK	

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi
Jülide UYSAL

Onaylayan
Şirket Müdürü
Turgut MEMİŞ